


Renamel® **DE-MARK**

Instrucciones de Uso

MATERIAL HÍBRIDO Y FLUIDO DE REVESTIMIENTO RADIOPACO

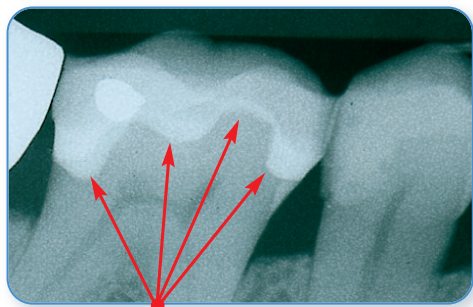

CON DE-MARK DIFERENCIAR EL COMPOSITE ES FÁCIL.

Composición

Renamel DE-MARK está compuesto de resinas acrílicas multifuncionales, 0,04 - 7 micrones de tamaño de partículas de cargas inorgánicas (66% en peso, 42% en volumen).

Almacenaje

- Una vez abierto, no refrigerar.
- Almacenaje entre 39 - 75° F (4 - 24 ° C).
- Caducidad: ver información acerca de las jeringas y / o envasado.
- Evitar la luz solar directa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar después de la fecha de caducidad

Packs/ Referencias

Renamel DE-MARK	jeringas de 3 gr.	#701-1DM
	Incluye 6 puntas — 3 de calibre 18 y 3 de 19	
Renamel DE-MARK	Repuesto de puntas (calibre 18)	Pack de 20 #203-102
Renamel DE-MARK	Repuesto de puntas (calibre 19)	Pack de 20 #203-103

Información Importante del Producto

Las leyes federales de Estados Unidos, restringen la venta de este producto. Solo se vende a dentistas o por orden de un dentista.

Nota: Este producto ha sido fabricado para utilizarse en el sector dental, de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños causados por su utilización para otros fines. El usuario está obligado a aceptar su responsabilidad de comprobar antes de utilizarlo, que el material está en perfectas condiciones para la finalidad indicada, particularmente si no está en la lista de instrucciones de uso.

Contraindicaciones: Renamel DE-MARK está contraindicado a pacientes que tengan alergia a cualquiera de los ingredientes integrantes en Renamel DE-MARK.

Efectos Secundarios: Puede causar irritación en pacientes muy sensibles.

Interacciones: No utilizar en combinación con materiales que contengan eugenol, ya que impedirían el proceso de polimerización.

Nota: Durante el tiempo que duran los procedimientos, evite sobre-exponerlo ante la luz de la operatoria, para proteger el material ante la polimerización.

Precaución: Renamel DE-MARK contiene 1,4 butanodiol dimetacrilato. Causa irritación en la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Use guantes de protección. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

Características Generales

Renamel® DE-MARK™ es un fondo cavitario fluido Radiopaco que delimita claramente su restauración de composite en una radiografía. Renamel DE-MARK fluye fácilmente y se adapta perfectamente al fondo de la preparación y las zonas de asiento gingivales. El uso de Renamel DE-MARK ayudará al médico a diagnosticar fácilmente caries recurrentes. Renamel DE-MARK se polimeriza con un luz LED y halógena en el rango de longitud de onda de 400-500 nm.

Indicaciones de Uso

- Revestimiento cavitario
- Material de revestimiento radiopaco que ayuda a evaluar la integridad marginal, descarta las restauraciones sobre extendidas, y ayuda a detectar caries recurrente.

Instrucciones de Uso

- 1 Después de la polimerización del agente adhesivo, colocar una capa delgada de Renamel DE-MARK en esa zona del asiento gingival y polimerizar 40-60 segundos. Esto reduce la contracción de polimerización y la sensibilidad postoperatoria.
- 2 Colocar el material restaurador de su elección, polimerizar, acabar y pulir.

Nota: Para cavidades profundas con solamente una pequeña capa de dentina sobre la pulpa o los que ya han tenido una pequeña área expuesta, la pulpa debe ser capsulada de forma indirecta o directamente utilizando localmente un compuesto de hidróxido de calcio. El compuesto de hidróxido de calcio se debe cubrir con un cemento de ionómero de vidrio antes de que el Renamel DE-MARK se inserte en la cavidad.

Símbolos utilizados en el etiquetado Internacional

C Comunidad Europea	Número de Catálogo
Fecha de caducidad	Temperatura de almacenaje recomendada
Descripción del Lote	Consultar instrucciones de uso
Fabricante	Proteger el producto de la luz solar directa
Información importante del producto: <small>Las leyes federales americanas restringen la venta de este producto y puede ser vendido solo a dentistas.</small>	Precaución

Manufacturado por:

Cosmedent, Inc.
401 N. Michigan Ave.
Suite 2500
Chicago, IL 60611-4243
US (1) 800-621-6729
US (1) 312-644-9586
www.cosmedent.com

Fabricante:

DeltaMed GmbH
Raiffeisenstrasse 8a
61169 Friedberg
Germany
www.deltamed.de

0124

www.sasexclusivasdentales.es

9 6 3 3 1 8 1 1 0

COSMEDENT®

Spreading Smiles®

Smiling Patients, Smiling Dentists.

Committed to better patient care with quality products and dedicated support.