

Enamelize®

Pasta de Pulir Composite



INSTRUCCIONES DE USO

Almacenaje

- Almacene entre 4-25° C
- Período de caducidad: Esta información esta especificada en los tubos y/o en las cajas
- Proteja ENAMELIZE del calor y la luz solar
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- No utilizar después de la fecha de caducidad

Embalaje / Referencias Catálogo

ENAMELIZE jeringa individual de 3 grs. #906-000
ENAMELIZE tubo de 36 grs. #906-101

Productos Complementarios:

FlexiBuffs Mini (3/8" de diámetro) Paquete de 100 #402-638
FlexiBuffs Mini (1/2" de diámetro) Paquete de 100 #402-612
FlexiBuffs Mini (5/8" de diámetro) Paquete de 100 #402-658
FlexiBuffs Regular (5/8" de diámetro) Paquete de 100 #401-658

Información Importante Sobre el Producto

Las leyes federales americanas restringen la venta de este producto y puede ser vendido solo a dentistas.

Nota: Este producto ha sido diseñado para ser utilizado en el sector dental y debe ser utilizado de acuerdo a las instrucciones de uso. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños causados al ser utilizado para otros fines.

El usuario está obligado a aceptar la responsabilidad de comprobar que está en perfectas condiciones para ser utilizado para la finalidad indicada, así como si no está listado en las instrucciones de uso.

Contraindicaciones: ENAMELIZE está contraindicado en pacientes alérgicos a cualquiera de sus componentes.

Precaución: ENAMELIZE contiene glicerina y puede causar irritación en personas sensibles. En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua y busque atención médica.

Características Generales

ENAMELIZE™ Utilizando la pasta Enamelize conseguirá que el pulido final de los composites, porcelana y metales sea tan brillante que de otra forma es muy difícil conseguir. Esta pasta de pulir incrementará el lustre, el brillo y dejará muy suave la superficie restaurada. Utilice Enamelize para el pulido final de composites micropartículas, nanopartículas, híbridos, metales y dientes naturales. Es también el mejor material para el cuidado rutinario de sus restauraciones. Enamelize proporciona un brillo que solo probándolo se puede creer.

Indicaciones

- Para composites micropartículas e híbridos
- Para todas las restauraciones de metal
- Después de utilizar la pasta de pulir de diamante, en las restauraciones de porcelana
- Después de la limpieza de los dientes naturales

Instrucciones de Uso

1. Aplicar ENAMELIZE sobre las áreas que se van a pulir
2. Todo lo que necesita para conseguir un brillo asombroso es aplicar Enamelize presionando levemente utilizando una taza de goma o un disco de fieltro, de esta forma mejorará la calidad de su restauración.
3. Un disco suave de fieltro aumentará el brillo.

Composición

ENAMELIZE está compuesto por agua, glicerina, aceite vegetal, emulsionante y óxido de aluminio.

Symbols Used in International Labeling

CE Comunidad Europea	REF Número del catálogo
Fecha De Caducidad	Temperatura de almacenaje recomendada
Descripción del Lote	Consultar instrucciones de uso
Fabricante	Proteger el producto de la luz solar directa

Manufacturado por:

Cosmedent, Inc.
401 North Michigan Avenue
Suite 2500
Chicago, IL 60611-4243
US (1) 800-621-6729
US (1) 312-644-9586
www.cosmedent.com

Fabricante:

DeltaMed GmbH
Raiffeisenstrasse. 8a
61169 Friedberg
Germany
www.deltamed.de



www.cosmedent.com
800.621.6729

COSMEDENT®
Spreading Smiles™

Smiling Patients, Smiling Dentists.

Committed to better patient care with quality products and dedicated support.