



Instrucciones de Uso

Renamel® GINGAFILL

Composite Microfill Rosa Fotopolimerizable

COSMEDENT®

Spreading Smiles™

CARACTERISTICAS GENERALES

Renamel Gingafill es un composite de microrrelleno rosa que le ayuda a simular la falta de tejido gingival. En los casos en que procedimientos de injerto no se puede lograr, **Renamel Gingafill** puede producir un resultado estético muy real. **Renamel Gingafill** consta de tres tonos de encía: rosa claro, medio y oscuro, y dos tonos de mezcla; azul y naranja.

Este material tiene la mismas propiedades, manipulación y acabado que el **Renamel Microfill** y es excepcionalmente fácil de manejar. **Renamel Gingafill** se coloca sencillamente, es fácilmente modelable y de pulido excepcional. La facilidad de colocación y gestión es una ventaja definitiva, sobre todo porque las áreas del surco son muy difíciles de acceder y mantener secas. Dado que el tiempo de trabajo en esta área es crítica, una aplicación rápida es esencial y **Renamel Gingafill** hace que la aplicación sea lo más rápida y exacta posible.

Renamel Gingafill es un material fotopolimerizable, microrrelleno, muy apto para pulido de empaste dental de acuerdo con EN ISO 4049. **Renamel Gingafill** se polimeriza con luz LED y luz halógena en el rango de longitud de onda de 400 - 500 nm.

COMPOSICION

Renamel Gingafill consiste en resinas acrílicas multifuncionales y materiales de relleno de 0,04 - 0,2 micras de tamaño de partículas inorgánicas y composite prepolimerizado (70% en peso, 60% en volumen).



ANTES

DESPUES CON RENAMEL GINGAFILL

Dentistry and Photography by: BUD MOPPER, D.D.S., M.S.

INDICACIONES DE USO

Renamel Gingafill se puede aplicar a esmalte, dentina, cemento, porcelana y material compuesto después del grabado y la adecuada aplicación de adhesivos dentales. Los defectos como la erosión cervical con pérdida de inserción gingival, la restauración de inserción gingival después de la cirugía periodontal y la reconstrucción de la pérdida de papila interdental son indicaciones de uso.

INSTRUCCIONES DE COLOCACION

1. Seleccione el tono
2. Prepare la superficie según sea necesario.
3. Grabar si es necesario, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4. Aplicar adhesivo dental de elección, tal como **Complete™** de Cosmedent.
5. Aplicar esmalte **Ginga Fill**. Esculpir el margen gingival en capas, máximo 2 mm de profundidad.
6. Polimerizar cada superficie durante 40 segundos (lámpara halógena o LED) y polimerización final de cada restauración en toda la superficie de 60 segundos. No trate de polimerizar a profundidades de más de 2 mm.

Nota: Los dentistas tienden a utilizar materiales compuestos de baja polimerización. Obtendrá mejores resultados si sobre polimeriza un poco.

INSTRUCCIONES DE COLOCACION (continuación)

7. El acabado debe hacerse con una combinación de materiales tales como diamantes, fresas de carburo y discos de óxido de aluminio en granos gruesos y medianos (**Flexi Discs™** de Cosmedent) de pulido.
8. Se puede lograr un pulido de alto brillo utilizando instrumentos de aluminio impregnados de goma, discos flexibles finos y superfinos (**FlexiDiscs™**) y (**FlexiCups™**), seguido de **Enamelize™** pasta de pulido aplicado con (**FlexiBuffs™**) todos de Cosmedent.

ALMACENAJE

- Una vez abierto, no refrigerar.
- Mantener **Renamel Gingafill** a temperatura ambiente (aproximadamente 4-24 ° C).
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Evitar la luz solar directa.
- Mantenga el material fuera del alcance de los niños .



INFORMACION IMPORTANTE DEL PRODUCTO

Las leyes federales de Estados Unidos, restringen la venta de este producto. Solo se vende a dentistas o por orden de un dentista.

Nota: Este producto ha sido fabricado para utilizarse en el sector dental, de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños causados por su utilización para otros fines. El usuario está obligado a aceptar su responsabilidad de comprobar antes de utilizarlo, que el material está en perfectas condiciones para la finalidad indicada, particularmente si no está en la lista de instrucciones de uso.

Contraindicaciones: **Renamel Gingafill** está contraindicado en pacientes que sean alérgicos a cualquiera de sus ingredientes.

Efectos secundarios: Puede causar irritación en pacientes muy sensibles.

Interacciones: No utilizar **Renamel Gingafill** en combinación con materiales que contengan eugenol, ya que impedirían el proceso de polimerización.

Nota: Durante el tiempo que duran los procedimientos, evite sobre-exponerlo ante la luz de la operatoria, para proteger el material ante la polimerización.

Precaución: **Renamel Gingafill** está contraindicado si el paciente es alérgico a cualquiera de sus componentes, 1,4-butanodiol dimetacrilato. Puede provocar reacción alérgica en la piel. Use guantes de protección. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.

PARA CONOCER MEJOR LAS TECNICAS DE COMPOSITE

Vea nuestros “Tip of the month” consejos del mes en www.cosmedent.com y visite nuestra página de técnicas www.DentalComposites.com

RENAMEL GINGAFILL • KITS Y COLORES

Renamel Gingafill Repuestos

Jeringas individuales, cada una de 3,5 gr.

Tonos: Rosa claro, rosa medio, rosa oscuro, azul y naranja.

Kit Renamel Gingafill

5 jeringas de 3,5 gr.

Tonos: Rosa claro, rosa medio, rosa oscuro, azul y naranja.

SIMBOLOS UTILIZADOS EN EL ETIQUETADO INTERNACIONAL

	CE Comunidad Europea		Número de Catálogo
	Fecha De Caducidad		Temperatura de almacenaje recomendada
	Descripción del Lote		Consultar instrucciones de uso
	Fabricante		Proteger el producto de la luz solar directa
	Información importante del producto: Las leyes federales americanas restringen la venta de este producto y puede ser vendido solo a dentistas.		Precaución

Manufacturado por: Cosmedent, Inc.
401 N. Michigan Ave.
Chicago, IL 60611-4243
US (1) 800-621-6729
US (1) 312-644-9586
www.cosmedent.com

Fabricante: DeltaMed GmbH
Raiffeisenstrasse 8a
61169 Friedberg
Germany
www.deltamed.de
 0124

www.sasexclusivasdentales.es

9 6 3 3 1 8 1 1 0

COSMEDENT®
Spreading Smiles™

Smiling Patients, Smiling Dentists.

Committed to better patient care with quality products and dedicated support.